

SPEIKO- Dr. Speier GmbH

návod k použití

Prosím, pečlivě si přečtěte.

CE



Prophylaxe Pulver soft minz intensiv

Složení:

obsahuje hydrogenuhličitan sodný, mátové aroma

Oblasti použití:

Odstranění odolných supragingiválních povlaků

Kontraindikace:

Při přecitlivělosti na složky přípravku

Prachový paprsek nesmí směřovat na dásně/měkké tkáně, obnaženou dentinovou vrstvu/zubní sklovinu.

Prachový paprsek nesměřujte na korunky, můstky ani výplně.

Pouze pro dentální použití.

Vedlejší účinky:

Při správném použití nejsou známy žádné.

Dávkování, způsob a délka užívání:

Účinné odstranění zubního plaku při minimálním opotřebením. K odstranění odolného supragingiválního plaku, jako je plak způsobený čajem, kávou a kouřením.

Vhodné pro všechna běžně dostupná zařízení pro tryskání práškem.

Dodržujte pokyny k použití uvedené výrobcem zařízení.

Poznámky:

Produkt nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte při pokojové teplotě. Před použitím dobře protřepejte.

Obchodní název: Prophylaxe Pulver soft minz intensiv 275g

Art.-Nr. 1029

Stav informací: říjen 2025

SPEIKO - Dr. Speier GmbH Walther-Rathenau-Str. 59 33602 Bielefeld

Telefon +49/521/770107-0 E-Mail: info@speiko.de www.speiko.de

Distributor ČR/SR:

Texdan s.r.o.

Ludvíka Středy 1143, 54232 Úpice

www.texdan.com

+420 739 693 258